



**PLÁN ÚDRŽBY A DESINFEKCE SOUPRAV A-DEC
A KONCOVEK WaH**

dentunit

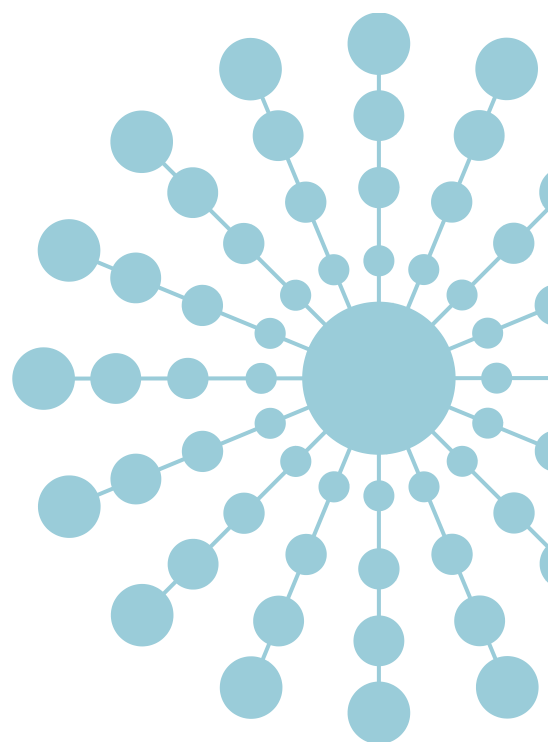

Pravidelná údržba soupravy:

DENNÍ ÚDRŽBA:

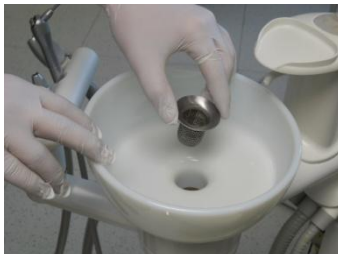

Vyčistěte sítko plivátka.



Vyčistěte sítko terminálu savek.

Dávkování Orotol Plus:
2 litry vody a 2 odměrky

Savky se proplachují
2x denně.



Namíchejte si desinfekční a čistící roztok Orotol Plus, Durr.



Míchací nádobu protřeptejte.

1. propláchnutí



Postavte nádobu na zem dle obrázku a připojte savky.



Nechte odsát cca polovinu roztoku z nádoby, odpojte savky a nádobu uschovejte.

2. propláchnutí




Položte nádobu na zem dle obrázku a připojte savky.



Nechte odsát většinu roztoku v nádobě, odpojte savky.



Zbylé množství roztoku vylijte do plivátka.

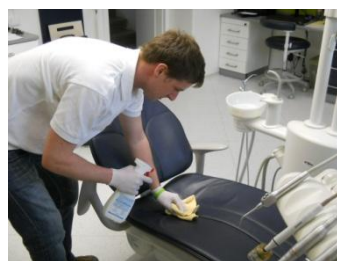


Očistěte polstrování „čistíkem“ DentUnitu.

TÝDENNÍ ÚDRŽBA:

(provádějte vždy jednou týdně ve stejném časovém úseku)



Nalejte do plivátka MD550 a nastavte si minutku na 15 minut.

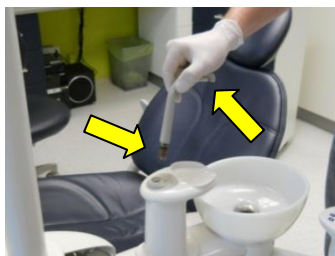


Zkontrolujte zanesení fontánky plivátka vodním kamenem. Případně vyčistěte.



Zkontrolujte zanesení trysky oplachu plivátka vodním kamenem. Případně vyčistěte.

Při použití odstraňovače vodního kamene na trysku a fontánku sundejte předem o_kroužek.

Při opětovném složení namažte.

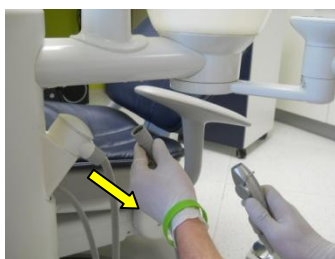

Demontujte hadici velké savky.



Propláchněte hadici střídavým pohybem proudem vody.



Rozeberte hlavici velké savky a vyčistěte.



Demontujte hadici malé savky.



Propláchněte hadici střídavým pohybem proudem vody.



Rozeberte hlavici malé savky a vyčistěte.

Namažte všechny černé o_kroužky vazelínou ALSITB.



Složte savky do původního stavu.



Po 15 minutách propláchněte plivátka velkým množstvím vody, minimálně 1 litr.



Zkontrolujte sítko savek separátoru amalgámu, případně vyčistěte proudem vody.



Zkontrolujte sítko plivátka separátoru amalgámu, případně vyčistěte proudem vody.

**Dávkování
Orotol MD555:
2 litry vody a 2 odměrky**

**Savky se proplachují
1x týdně.**



Namíchejte si čisticí roztok Orotol MD 555, Durr.



Míchací nádobu protřepteje.



Položte nádobu na zem dle obrázku a připojte savky.



Zbylé množství roztoku vylijte do plivátka.



Vyčistěte ochranný kryt světla od prachu.





Otřete plastové kryty soupravy od prachu.

Dále proveďte denní údržbu.

NEPRAVIDELNÁ ÚDRŽBA:

ÚDRŽBA KONCOVEK

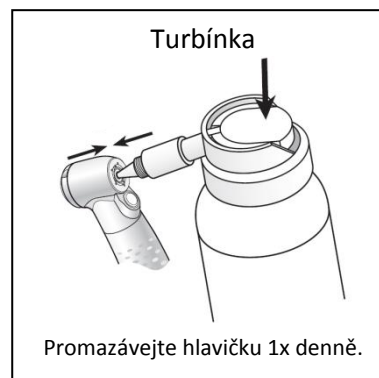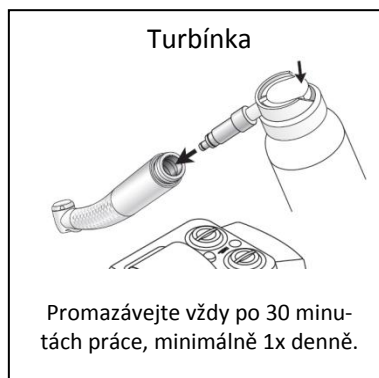

Po namazání nechte koncovku hlavičkou dolů cca 30 sekund chodu.

DOPLŇOVÁNÍ LÁHVE S DESTILOVANOU VODOU

